

Instructies voor monsterafname:

Voorzorgen bij afname:

Zorg dat de punt van het wattenstaafje vóór de afname NIET in contact komt met enig oppervlak.

De donor mag gedurende de 30 minuten voor het afnemen van het orale monster NIET eten, drinken, roken of kauwgom kauwen.

Beoogd gebruik: Dit product is bestemd voor het verzamelen en stabiliseren van DNA uit orale monsters.

Inhoud: Bevat 1 afnamekit.

Waarschuwing en voorzorgen: Verstikkingsgevaar. Het wattenstaafje moet voorzichtig in de mond worden gebracht.





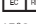


Wassen met water indien vloeistof in contact komt met de ogen of de huid. Niet inslikken. Raadpleeg MSDS op www.dnagenotek.com.

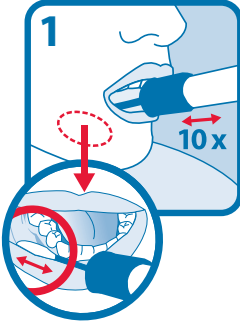
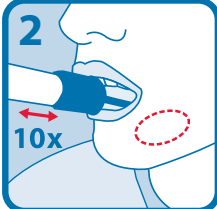
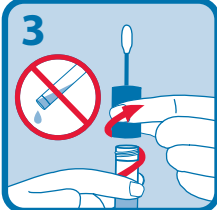
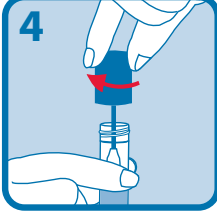
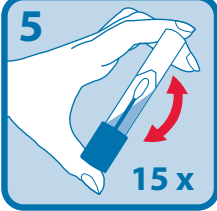
Opslag: 15-25°C

Samenvatting en toelichting op de kit:

ORACollect-DNA is een zelfverzamelingsset die de materialen en instructies bevat voor het verzamelen van humane orale monsters.

Labelopschrift:

	Catalogusnummer
	Medisch hulpmiddel voor in vitro diagnostiek
	CE-markering
	Fabrikant
	Erkende vertegenwoordiger
15°C-25°C	Opslaginstructies
	Monster uiterlijk afnemen op (uiterste gebruiksdatum)
	Lotnummer

	Open de verpakking en verwijder het wattenstaafje zonder het uiteinde met de watten aan te raken. Plaats het wattenstaafje zo ver als comfortabel is in de mond en wrijf heen en weer over het tandvlees aan de onderkant (zie close-up afbeelding). Wrijf voorzichtig 10 maal heen en weer over het tandvlees. Voorkom, indien mogelijk, dat u langs de tanden gaat.
	Herhaal de handeling nogmaals 10 maal voorzichtig aan de andere kant van de mond langs het onderste tandvlees.
	Houd het buisje rechtop om te voorkomen dat u de vloeistof in het buisje morst. Schroef de dop van het testbuisje zonder het wattenstaafje aan te raken.
	Draai de dop op de kop, steek het wattenstaafje in het buisje en sluit deze goed af met de dop.
	Draai het afgesloten buisje om en schud het 15 maal stevig.


Uitsluitend voor in vitro diagnostisch gebruik


Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

DNA genotek

Superieure monsters
Bewezen resultaten

 Geproduceerd in Canada
 DNA Genotek Inc.
 3000 - 500 Palladium Drive
 Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

 Tel.: +1.613.723.5757
 Fax: +1.613.723.5057
 info@dnagenotek.com
 www.dnagenotek.com

ORACollect®-DNA wordt niet verkocht in de Verenigde Staten.

*ORACollect is een gedeponneerd handelsmerk van DNA Genotek Inc.

Sommige DNA Genotek producten zijn mogelijk niet in alle geografische regio's verkrijgbaar, neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger voor meer informatie.

 Alle DNA Genotek producten, technische documentatie en toepassingsaantekeningen, zijn beschikbaar in het onderdeel 'support' van onze website op www.dnagenotek.com.

 Octrooi (www.dnagenotek.com/legalnotices)

 © 2017 DNA Genotek Inc., een dochteronderneming van OraSure Technologies, Inc., alle rechten voorbehouden.
 PD-PR-00392 (NL - Dutch) Issue 1/2017-06